

ROCKET D.V.A.

Istruzioni: leggere attentamente prima dell'uso.

Posizionare pulsante di allineamento B sulla parte posteriore della siringa A.

Far scivolare le ali della siringa A nel fermaglio C; assicuratevi che siano ben fissate.

Svitare una delle estremità arrotondate del bastoncino di spinta D nel fermaglio C, finché non si rileva una certa resistenza.

Far scivolare la ruota E sul bastoncino di spinta D finché non è contro il fermaglio.

Allineare pulsante di fermata F con bastoncino di spinta D e inserire nella ruota E.


Rimuovere il tappino arancione dalla siringa e inserire la punta in dotazione. Se necessario, la punta può essere accorciata con le forbici o con un coltello affilato.

Per l'uso.

1. Per far uscire l'adesivo, tenere con una mano la siringa puntandola verso il basso e con il pollice far roteare gentilmente la ruota E in senso orario.
2. La quantità di adesivo da utilizzare può essere minutamente regolata con piccole rotazioni della ruota E.
3. Dopo l'uso, posare la siringa sul supporto.
4. Spruzzare una sola volta con l'acceleratore a ca. 8 cm dal modello.

NOTE IMPORTANTI:

- tenere separate le siringhe di adesivo dall'acceleratore
- se possibile, refrigerare sempre il prodotto, o tenere almeno in condizioni di ambiente asciutto.

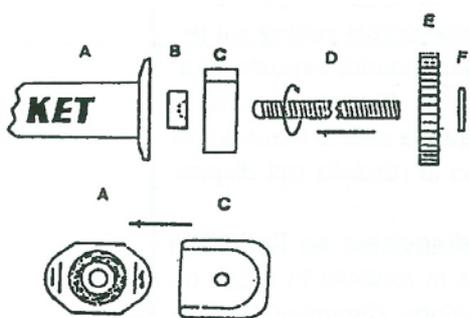

- prima di ogni uso, rimuovere il residuo dalla punta
- se l'adesivo non fuoriesce con una normale pressione, non sforzare; cambiare eventualmente la punta; se nemmeno così funziona, presumere che l'adesivo si sia indurito.

CONSIGLI UTILI

Quando si desidera utilizzare solo delle piccole quantità di adesivo, è sufficiente far semplicemente ruotare la ruota E finché il materiale non è visibile

chiaramente in punta; poi tenendo la siringa fra le dita, toccate la parte finale con la punta per lavorare la zona prescelta.

Se volete, potete spremere gentilmente sulle pareti della siringa per ottenere quantità ancora minori, piuttosto che tenere la siringa verticalmente e schiacciandola al centro.

RICORDATE

Eviterete un uso eccessivo di materiale se applicate una rotazione lenta ed accurata.

AVVERTENZE

Rocket Cianocrilato

Contiene cianoacrilato, irritante per gli occhi e danneggia i vestiti. Usare occhiali protettivi. In caso di contatto con gli occhi risciacquare con acqua lasciando gli occhi aperti. Consultare un medico immediatamente. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Solo per uso esterno.

Rocket Acceleratore

Non versare o usare vicino fiamme libere, calore o scintille.

Utilizzare solo come indicato

Attenzione: usare con una ventilazione adeguata. Evitare un'esposizione prolungata ai vapori. Evitare un contatto prolungato con la pelle. Non deve essere utilizzato intraoralmente. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

ROCKET CIANOCRILATO

Per prevenire l'indurimento nelle punte

Non mettere Rocket e acceleratore nello stesso contenitore una volta aperti

I fumi dell'acceleratore causerebbero l'indurimento dell'adesivo nella punta ed eventualmente anche nella siringa. Anche spruzzare l'acceleratore nella zona in cui si trova la siringa può causare gli stessi problemi.

Se si lasciano delle bolle d'aria nella punta del Rocket, l'adesivo potrebbe indurire.

Quando si finisce di utilizzare il Rocket, l'adesivo dovrebbe riempire completamente la punta e formare una piccola pallina sul terminale della punta. Questa pallina indurirà esposta all'aria e sigillerà il terminale della punta. Quando si riutilizza il Rocket rimuovere semplicemente la pallina indurita: l'adesivo fluirà liberamente girando la rondella del dispenser.

Non forzare la rondella del dispenser se l'adesivo non fluisce facilmente.

Svitare la rondella in modo da eliminare ogni pressione nella siringa. Rimuovere delicatamente la punta ed inserirne una nuova. Se si volesse rimuovere il materiale indurito dalla punta usare un filo ortodontico sottile inserito dal retro della punta spingendo fuori il materiale indurito.

PRODUTTORE: DVA – CA- USA

DISTRIBUTORE: Micerium S.p.A

Via Marconi, 83 16036 Avegno (Ge)

Tel. 0185/7887870