

SL silver line Gel

con Aloe, estratto di Canapa
Argento Colloidale (10 ppm)



INDICAZIONI

- >> Afte, Ulcere, Stomatiti aftose ricorrenti, Gengiviti, Parodontiti
- >> Mucositi da Radioterapia e Chemioterapia
- >> Interventi chirurgici del cavo orale, Estrazioni difficili
- >> Implantologia
- >> Ulcere traumatiche da protesi e apparecchi ortodontici
- >> Burning Mouth Syndrome (Sindrome della bocca che brucia)

Proprietà

- >> Aderisce alla mucosa orale
- >> Forma un film protettivo
- >> Formulazione concentrata con argento colloidale (10 ppm), effetto antivirale-antibatterico, ph neutro
- >> A base di estratto di Canapa, Aloe, Acido ialuronico e Vitamina E
- >> Privo di fluoro, zuccheri, opacizzanti, alcool, profumi, derivati dal petrolio, siliconi e parabeni

Benefici

- >> Dona rapido sollievo
- >> Elimina il senso di bruciore
- >> Protegge la mucosa orale
- >> Grazie alla sua funzione antiossidante garantisce il benessere e l'igiene della bocca

« ARGENTO COLLOIDALE GEL »
Effetto antivirale-antibatterico naturale »


PROTOCOLLO

1. Per afte, ulcere e stomatiti aftose ricorrenti si consiglia al paziente di applicare il gel 2 o 3 volte al giorno senza risciacquare nelle zone interessate per circa un minuto.
2. Per gengiviti e parodontiti si prevede l'applicazione del gel dopo la seduta di terapia parodontale non chirurgica e si consiglia al paziente di utilizzare il gel 2 o 3 volte al giorno senza risciacquare nelle zone interessate per circa un minuto.
3. Il gel argenteo colloidale aderendo bene alla mucosa orale e creando un film protettivo è l'ideale per interventi chirurgici del cavo orale e estrazioni, si consiglia la sua applicazione all'interno dell'alveolo e sopra le suture.
4. Per interventi implantari si prevede l'applicazione dopo l'inserimento dell'impianto e completate le suture.
5. In presenza di ulcere traumatiche da protesi rimovibili e apparecchi ortodontici si consiglia al paziente di applicare il gel sotto la sella a contatto con le gengive.
6. Per i pazienti affetti da Burning Mouth Syndrome (Sindrome della bocca che brucia) si consiglia al paziente di applicare il gel 2 o 3 volte al giorno su tutta la bocca per circa 1 minuto senza risciacquare.

MODALITÀ DI UTILIZZO

L'argento colloidale gel viene applicato grazie all'utilizzo di siringhe specifiche, con l'ausilio di un puntale monouso, che facilitano l'inserimento del gel all'interno delle tasche parodontali, negli alveoli dopo avulsioni dentarie e in tutte le indicazioni sulle mucose orali. Le siringhe con il puntale consentono una maggior precisione durante l'applicazione e un maggior controllo del dosaggio. La ricarica della siringa avviene semplicemente.

Afte

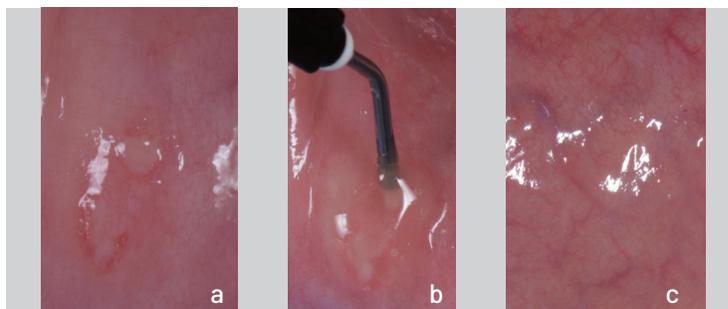

a) Immagine clinica dell'afte • b) Applicazione gel argenteo
c) Situazione clinica dopo il trattamento, il gel lenisce il fastidio e velocizza la guarigione

Caso clinico

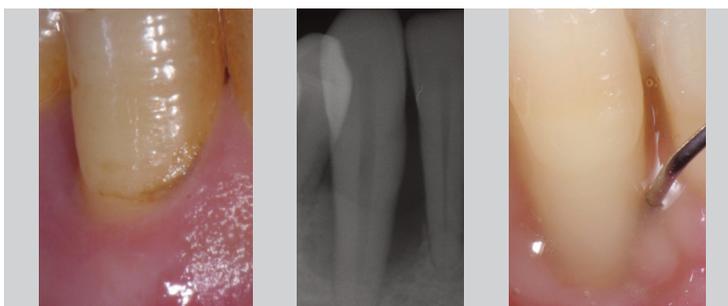



Immagine clinica e radiografica iniziale del difetto parodontale

Applicazione del gel Silver Line



Immagine clinica e radiografica dopo 12 mesi, da notare la rigenerazione ossea.

Ricarica siringa

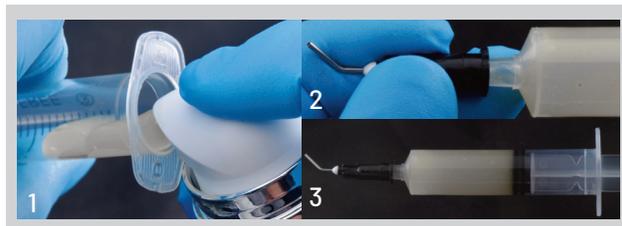

- 1) Rimozione stantuffo e inserimento del gel all'interno
- 2) Montaggio punta applicatrice
- 3) Inserimento stantuffo