


# Open

*Abitudini viziate, addio!*

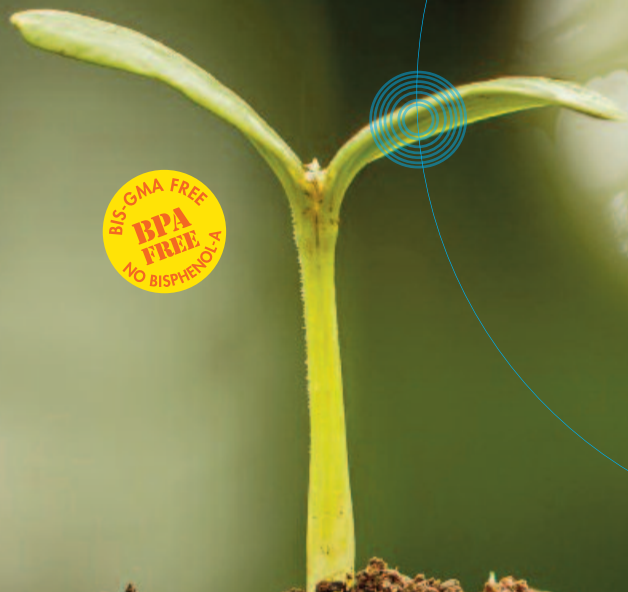

BIS-GMA FREE  
**BPA  
FREE**  
NO BISPHENOL A



**AMCOP**<sup>®</sup>




  
ELASTODONTIC<sup>®</sup>  
therapy

ortodonzia  
**M**<sup>®</sup>  
GRUPPO  
MICERIUM

# Open



*Abitudini viziate, addio!*

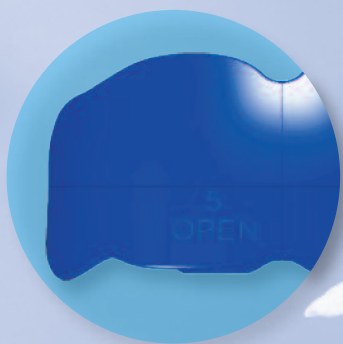

I dispositivi **Open** sono disponibili in cinque misure.

Si distinguono da altri dispositivi, e fra loro, attraverso sigle posizionate nella parte anteriore destra della flangia inferiore.

## CONTROINDICAZIONI

Il dispositivo **Open** è controindicato in caso di:

- Specifiche problematiche alle articolazioni Temporo-Mandibolari (ATM)
- Elementi Dentari con accentuata mobilità di carattere parodontale
- Gengivite conclamata


**AMCOP**  
*Open*



# Open

**Open** è un nuovo dispositivo elastodontico della gamma dei **Bio-Attivatori Amcop**,

indicato per il trattamento delle arcate dentarie, con malocclusione di carattere scheletrico, di tipo morso aperto anteriore (Open Bite); che ha come causa determinante, abitudini viziate riguardanti la deglutizione atipica e uno specifico scompensamento di carattere scheletrico cranio-mandibolare. Il dispositivo deve essere prescritto dal medico ortodontista dopo una corretta diagnosi per una giusta pianificazione del trattamento da eseguire.

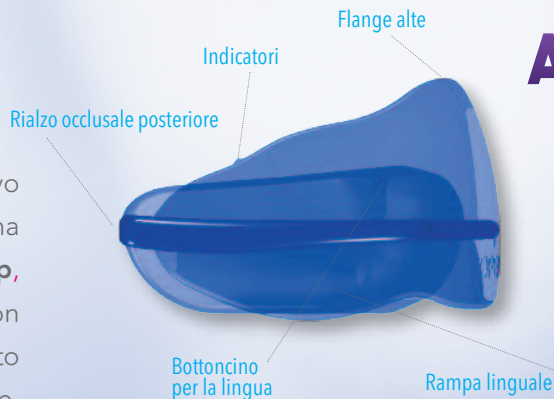

**AMCOP®**



Prima di iniziare il trattamento con dispositivo **Open** è necessario, attraverso una accurata analisi cefalometrica in proiezione latero-laterale delle teleradiografie del cranio, comprendere il tipo di Open Bite che deve essere specificatamente scheletrico.

L'azione ortodontica-ortopedica specifica, procurata dal dispositivo, av-

viene attraverso uno sblocco di determinate strutture scheletriche cranio-facciali in movimento di anteroflessione con il ripristino, in equilibrio, del piano occlusale, con conseguente risoluzione del morso aperto anteriore (Open Bite).

Il piano occlusale del Bio-Attivatore **Open** risulta rialzato posteriormente

e ha come fine un'azione di spinta specifica sui molari posteriori.

Il rialzo occlusale avrà funzione "tipo fulcro", tale da ripristinare il piano occlusale in orizzontale.

**Si sottolinea che, il dispositivo in questione, sostituisce l'applicazione di fascette su dispositivi Bio-Attivatori Amcop di prima classe.**

Il dispositivo è stato progettato con una guida occlusale adatta a contenere le diverse tipologie di forma di arcata. Per un'educazione funzionale della lingua è presente, così come nei Bio-Attivatori Amcop, il bottoncino in zona plantare, in corrispondenza dello spot palatino (area palatina retroincisiva superiore).

## OPEN 1

Dispositivo Extra Small  
Colore **Blu**  
Misura trasversale di 45mm\*

## OPEN 2

Dispositivo Small  
Colore **Blu**  
Misura trasversale di 50mm\*

## OPEN 3

Dispositivo Medium  
Colore **Blu**  
Misura trasversale di 55mm\*

## OPEN 4

Dispositivo Large  
Colore **Blu**  
Misura trasversale di 60mm\*

## OPEN 5

Dispositivo Extra Large  
Colore **Blu**  
Misura trasversale di 65mm\*

\* Misura rilevata dalla distanza trasversa che separa le cuspidi vestibolari dei sestri superiori


# Open



casì clinici Dr. F. Cardarelli

DISPOSITIVO INDICATO PER IL TRATTAMENTO DI MALOCCLUSIONI DI CARATTERE SCHELETRICO

## ALTRI DISPOSITIVI AMCOP

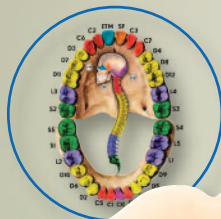

BIO-ATTIVATORE



INTEGRAL PLUS



Micerium S.p.A.  
Via G. Marconi 83  
16036 Avegno (GE)  
Italy



Tel. +39 0185 7887 893  
Fax +39 0185 7887 950



funzionali@micerium.it  
www.micerium.it  
www.amcop.it

**AMCOP**<sup>®</sup>

ortodonzia  
**M**<sup>®</sup>  
GRUPPO  
MICERIUM

ELASTODONTIC<sup>®</sup>  
Therapy